


Procedure for udtagning af hår til brug ved bestemmelse af DNA-analyse hos heste:

- Hvornår:** Når det jævnfør generelt regelsæt for stambogsføring kræves, at en hest afstammingsverificeres, eller når hestens ejer ønsker dette foretaget.
- Prøvetagningssæt:** Bestillingsblanket
Emballage (plastikpose)
Karton med tape
- Hvordan:** Ca. 2-3 hårtotter med rod udtages (med engangshandsker) fra hestens man eller hale. Sørg for at området hvor hårprøven udtages er rent, så der ikke kommer løse hår og urenheder med.
- Hold om hårtotten nær ved roden og sæt det fast på karton- skiven med tapen (kan løftes, trykkes fast igen), så roden er en ½-1 cm uden for kartonskivens kant.
- Klip overflødigt hår af inden kartonskiven, med hårprøven, lægges i dertil egnet emballage med påført hestens navn og registreringsnummer. Hårprøven skal være tør, idet fugt vil 'forstyrre' prøveresultatet. Dette indsendes sammen med udfyldt bestillingsblanket omkring dyrets signalement og ejerforhold.
- Hvem:** Prøven må udtages af dyrlæger samt Videntretet for Landbrug | Hestes identitetsmærkere.
- Generelt:** Skema til brug ved besigtigelse og mærkning skal følge prøven.
- Dyrets ejer attesterer ved udtagningen, at prøven er foretaget af det korrekte dyr.

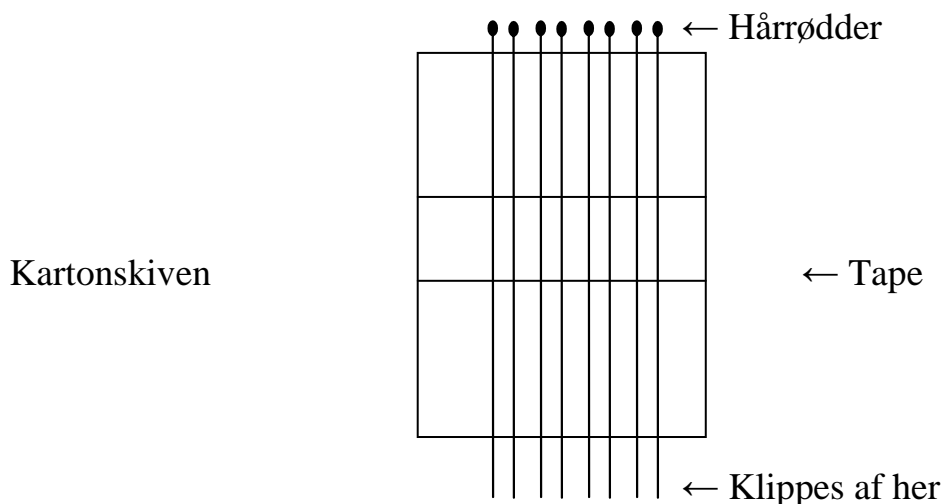

Venlig hilsen

DNA- og Blodtypelaboratoriet for Heste

Autoriseret af Landsudvalget for Heste
Rødebækvej 2, Rodelund, DK-8653 Them
Tlf. +45 87 98 11 77 • Fax +45 86 84 94 11
lab@hestehospitalet.dk